

NÁVOD NA POUŽITÍ: OPERAČNÍ ČEPICE – JEDNORÁZOVÁ

Popis:

Operační čepice z netkané textilie je jednorázový nesterilní zdravotnický prostředek užívaný při operačních zákrocích pro ochranu operačního pole před kontaminací uvolněnými částicemi pokožky či vlasy zdravotnického personálu.

Třída ZP: I nesterilní

Prohlášení o shodě:

Kopii prohlášení o shodě je možné získat na stránkách www.medicafilter.cz v sekci „Ke stažení“, případně na e-mailu: info@medicafilter.cz

Otevírání:

Otevřete horní víko krabice, nebo vytrhněte otvor v perforaci, pokud je jím krabička vybavena.

Manipulace:

- 1) Čepici vyjměte z obalu a zkontrolujte, zda není poškozená.
- 2) Nasadte čepici na hlavu tak, aby zakryla celou hlavu a vlasy a zároveň neomezovala ve výhledu.
Pozor: za výběr odpovídajícího typu čepice je odpovědný uživatel. Při výběru a použití nevhodné čepice může vzniknout riziko nedostatečné ochrany pacienta před padajícími vlasy a částicemi kůže.
- 3) Pokud čepice během operace zvlhne nebo dojde k jejímu porušení, je nutné ji vyměnit za novou.
- 4) Po použití zlikvidujte v souladu s vašimi interními předpisy nakládání s odpady skupiny 18 01 04 (Odpady, na jejichž sběr a shromažďování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce).

Expirace:

Životnost tohoto zdravotnického prostředku je stanovena na 5 let od data výroby, při odpovídajícím skladování.

Skladování:

Skladujte při teplotě 5°C - 35°C a při vlhkosti 20 % - 80 % v uzavřeném balení.

Upozornění:

Nepoužívejte operační čepici pokud:

- je po vyjmutí z obalu poškozená (díry v materiálu, utržená gumička, aj.). Je nutné ji vyhodit a použít jinou, neporušenou.
- má prošlou expiraci.
- je před prvním otevřením porušen obal.
- pokud trpíte alergií na latex – týká se čepic typu AFRO, BARET, CLIP, FLIP, UNI a VARIO.

Nepoužívejte výrobek k jinému účelu, než je stanoven – viz „Popis“ výše.

Nepoužívejte výrobek opakovaně, hrozí nebezpečí kontaminace operačního pole.

Výrobek není určen k používání jako osobní ochranný prostředek.

Na výrobu čepic je použit tenký prodyšný materiál, který nemůže být příliš mechanicky namáhán. Při hrubé manipulaci může dojít k roztržení čepice.

Datum: 19.04.2021

Číslo dokumentu: 3330421

MEDICA FILTER spol. s r.o.

Smetanova 421, 341 92 Kašperské Hory, Czech Republic
www.medicafilter.cz

