

GEBRAUCHSANWEISUNG: CHIRURGISCHE HAUBE – EINWEG

Beschreibung:

Chirurgische Haube aus hochwertigem, atmungsaktivem Vliesstoff ist ein unsteriler Einweg-Medizinprodukt, der bei chirurgischen Eingriffen eingesetzt wird, um das Operationsfeld vor Kontamination durch lose Hautpartikel oder Haare des medizinischen Personals zu schützen.

Medizinproduktklasse: I unsteril

Konformitätserklärung:

Eine Kopie der Konformitätserklärung finden Sie im Internet: [https://www.medicafilter.cz/de/128-zum-herunterladen-\(downloads\)/](https://www.medicafilter.cz/de/128-zum-herunterladen-(downloads)/) oder können Sie per E-Mail befragen: info@medicafilter.cz

Öffnung:

Um die Haube zu hervorholen, öffnen Sie den oberen Deckel der Schachtel, oder reißen Sie die Perforation in dem Deckel aus (falls Schachtel dieser Art verwendet wurde).

Manipulation:

- 1) Entfernen Sie die Haube aus der Verpackung und prüfen Sie, dass die Haube unbeschädigt ist.
- 2) Setzen Sie die Haube so auf Ihren Kopf, dass sie die gesamte Haarbedeckung verbirgt und gleichzeitig die Sicht nicht einschränkt.

Achtung: Der Benutzer ist für die Auswahl der geeigneten Haube verantwortlich. Bei Auswahl und Verwendung einer ungeeigneten Haube besteht möglicherweise die Gefahr eines unzureichenden Schutzes und Einschränkung der Kopfhaut, und die Kappe kann möglicherweise nicht in der Lage sein, fallendes Haar zurückzuhalten.

- 3) Wenn die Haube während der Operation nass oder gebrochen wird, muss sie durch eine andere, intakte ersetzt werden.
- 4) Entsorgen Sie die chirurgische Kappe nach Gebrauch folgend Ihre interne Instruktionen für Entsorgung von Abfallgruppe 18 01 04 (Abfälle mit keine besondere Anforderungen aus infektiöspräventiver Sicht)

Haltbarkeit:

Die Haltbarkeit dieses Medizinprodukts ist 5 Jahre ab Herstellungsdatum bei entsprechender Lagerung.

Lagerung:

Bei Temperatur 5°C - 35°C und Luftfeuchtigkeit 20% - 80% lagern.

Beachten:

Verwenden Sie die chirurgische Haube NICHT, wenn:

- sie nach Abnehmen aus der Verpackung beschädigt ist (Löcher im Material, zerrissenes Gummiband usw.).
- ihre Haltbarkeit abgelaufen ist.
- die Verpackung vor erstem Öffnen beschädigt ist.
- die an Latexallergie leiden - gilt für AFRO-, BARET-, CLIP-, FLIP-, UNI- und VARIO-Hauben.

Verwenden Sie das Produkt für keinen anderen als den angegebenen Zweck - siehe "Beschreibung" oben. Verwenden Sie das Produkt nicht wiederholt, da die Gefahr einer Kontamination des Operationsfeldes besteht. Das Produkt ist nicht zur Verwendung als persönliche Schutzausrüstung vorgesehen.

Die Hauben werden aus einem dünnen, atmungsaktiven Material hergestellt. Dieses Material kann nur begrenzter mechanischen Beanspruchung ausgesetzt werden. Eine grobe Behandlung kann die Haube zum Bruch führen.

Datum: 19.4.2021



Dokumentnummer: 333DE0421